

**PRODUTO**

Máscara de proteção com elástico e 4 camadas.

Rua de Bande, nº429 | 4590-049 Carvalhosa | Paços de Ferreira | Portugal  
(\*351) 255 868 000 info@hospprotect.com www.petratex.com

**USO**

Máscara têxtil destinada a ser utilizada pela comunidade em geral, com vista a prevenção do contágio do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

**MATÉRIAS PRIMAS**

2 camadas - Tecido 100%Pes.  
2 camadas - Não tecido 100% Pes.

**DESCRIÇÃO**

- Mascara reutilizável (40 utilizações).
- Estilo pregueado (3 pregas).
- Com elásticos auriculares.
- Com ajuste nariz.
- Estrutura protetora quatro camadas.
- Acabamento antibacteriano.

As máscaras faciais ajudam a evitar que partículas expelidas pelo utilizador (por exemplo, saliva, muco) atinjam outras pessoas ou superfícies, prevenindo o contágio do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), assim como, protegem o utilizador de partículas ou fluidos vindos de outros.


**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

A lavagem antes da primeira utilização é facultativa.  
Após utilização deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem completo de no mínimo de 30 minutos, a 60°C com detergente. Apenas podem ser utilizadas depois de bem secas.  
Em caso de necessidade, as máscaras podem ser esterilizadas, após lavagem, à temperatura máxima de 134°C, durante 3 minutos.

**APROVAÇÕES** Máscara para uso social CWA 17553:2020.

TESTES	RESULTADOS	LABORATÓRIO
Eficiência de filtração bacteriana	94% APÓS 10 LAVAGENS	AITEX (ESPANHA)
Eficiência de filtração de partículas >70%	<b>99%</b>	IFTH (FRANÇA)
Respirabilidade >96 L.m-2.S-1	<b>553</b> APÓS 40 LAVAGENS	IFTH (FRANÇA)
Resistência Splash	32 TESTES ZERO FALHAS	AITEX (ESPANHA)
Bioburden <=30 CFU/g	OK CONTROLO PRODUÇÃO	SAGILAB (PORTUGAL)

**ESQUEMA DO PRODUTO**

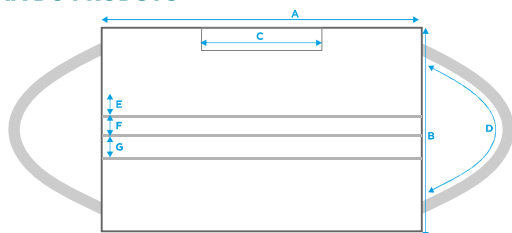


A	LARGURA	17CM
B	ALTURA	10CM
C	AJUSTE	8,5CM
E/F/G	PREGAS	1CM
D	ELÁSTICO	18CM

**OBS:** A nossa tolerância é de +/- 1cm na dimensão das máscaras (largura/comprimento).



**COMO COLOCAR A MÁSCARA:**

- Lave as mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool (antes de colocar a máscara);
- Colocar a máscara na posição correta. A borda dobrável deve estar para cima;
- Segurar a máscara pelas linhas de suporte/elásticos e adaptar a cada orelha;
- Ajustar a máscara junto ao nariz e queixo, sem tocar na face da máscara.

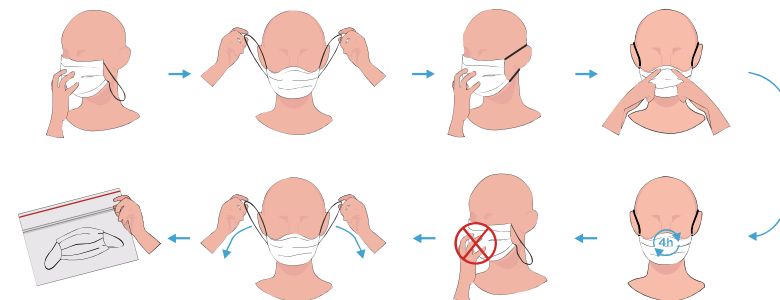

**COMO RETIRAR A MÁSCARA:**

- Lavar as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool;
- Retirar a máscara apenas segurando nas linhas de suporte/elásticos;
- Manter a máscara longe do rosto e da roupa, para evitar tocar em superfícies potencialmente contaminadas da máscara;
- Colocar a máscara no recipiente adequado e lavar novamente as mãos.



LAVÁVEL



3 PREGAS



ELÁSTICOS



AJUSTE  
NO NARIZ



4 CAMADAS  
PROTECTORAS



ACABAMENTO  
ANTI BACTERIANO

**NOTA:** A Petrutex reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração à presente ficha técnica sem aviso prévio. Para qualquer informação adicional, por favor, contactar o nosso Departamento Técnico.